


## JUMBOREST - APOYABRAZOS UNIVERSAL CE

Corrección postural para todos los tipos de mesas. Universal, ajustable y portátil.

Desarrollado en colaboración con terapeutas ocupacionales.


- Diseñado para todo tipo de actividades en mesas de comedor, estudio, terapia, etc. sean rectangulares o redondas, incluso con faldón (hasta 130mm incluido tablero).
- También compatible con encimeras de cocinas adaptadas (con espacio libre bajo la encimera).
- Tornillo opcional para bloqueo en la posición deseada.
- Montaje e instalación extremadamente sencillos. Permite transportarlo fácilmente para su uso en casa, en el trabajo, el restaurante, etc.
- Ajustable sin herramientas a lo largo del tablero.
- El uso de dos unidades convierte cualquier mesa normal en una mesa ergonómica con escotadura.

# Características técnicas

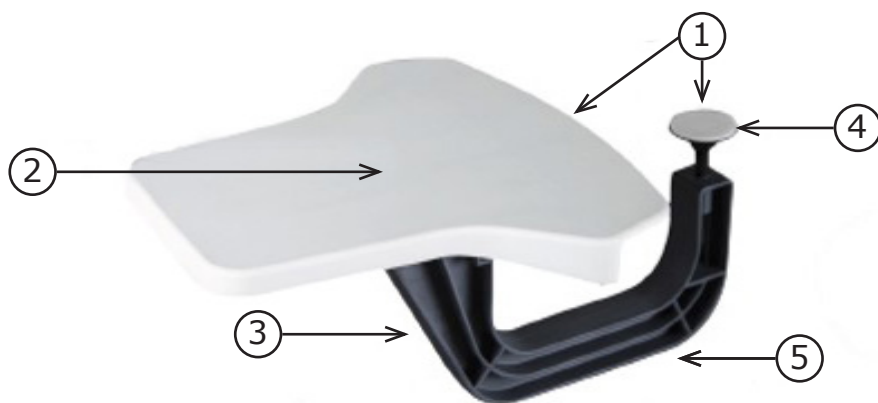

- ① Superficies anti-deslizantes para una correcta sujeción a la mesa.
- ② Zona de apoyo suave y de fácil limpieza.
- ③ Tres diferentes posiciones (derecha/central/izquierda): libre acceso para sillas de ruedas con apoyabrazos.
- ④ Sujeción ajustable: para tableros entre 20 y 45 mm de grosor.
- ⑤ Estructura resistente: soporta un peso de 100kg.


## INSTRUCCIONES DE USO

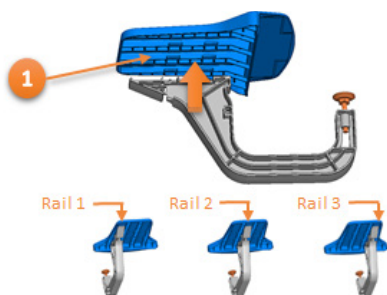

Alinear el extremo del brazo multi-posición en su alojamiento en la parte inferior de la superficie de apoyo (en posición izquierda, central o derecha).




Colocar el apoyabrazos en el borde de la mesa.

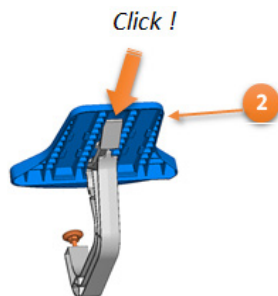


Presionar el brazo contra su alojamiento hasta oír un "click".



Para desmontar: tirar hacia fuera de la pieza del extremo del brazo y deslizar el brazo separándolo de la superficie de apoyo.

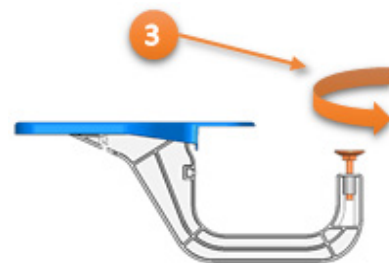

Girar el tornillo de sujeción hasta ajustarlo al grosor de la mesa.

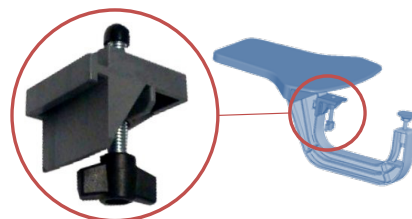

Bloqueo opcional: insertar el tornillo de bloqueo en el alojamiento previsto en el brazo y apretarlo contra el tablero de la mesa.